



「メディキュア」ブランドサイト  
<https://www.medicure-gunze.com/>

明日をもっと、こころよく  
**GUNZE**

カッティングチューブで作る

オストメイトのための

腹帯の作りかた

衣料 から 衣療 へ。

**MediCure**  
メディキュア

用意するもの


カッティングチューブ



パウチ




1

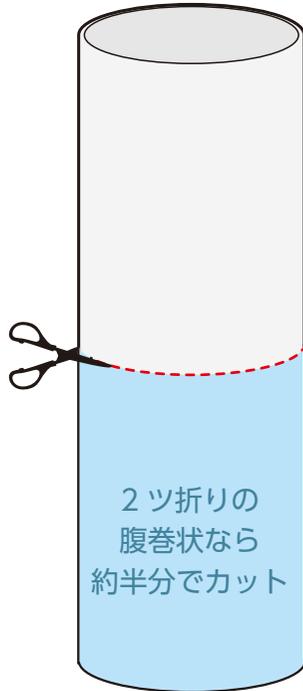

必要な長さに切る

2

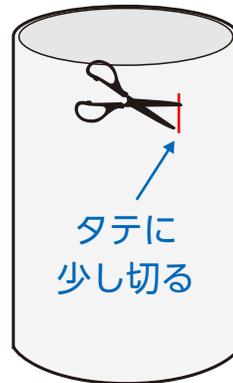


ストーマ袋を通す穴を開ける

丸い穴を開ける必要はありません。


カッティングチューブに1本切込みを入れるだけ。自分だけの快適な腹帯がカンタンに作れます。

3

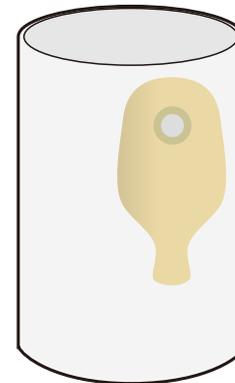

腹帯を着用し、ストーマ袋を通す

4

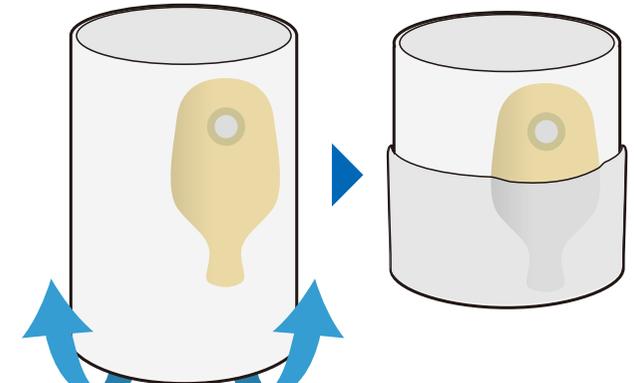

裾を折り返し、ポケット状にすると、パウチを支えられます

## 装具取り付け穴の開け方

位置を決める



切る線と、その中心位置に線を書きます。布書き用ペンなどをご使用ください。

まっすぐ切る



中心線の上で生地を二つ折りにし、ラインに沿ってハサミで生地を切ります。


## <着用した時>



カットしたところが自然に広がります。

## <パウチ装着時>

パウチ

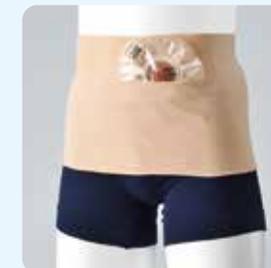

パウチ+ベルト



装具装着時のイメージ